




UNILINE® Bildschirm-Abdeckung **STERILE R**


Zweckbestimmung: Sterile, hochtransparente Folie zur Abdeckung von Monitoren für die Dauer einer Anwendung

1

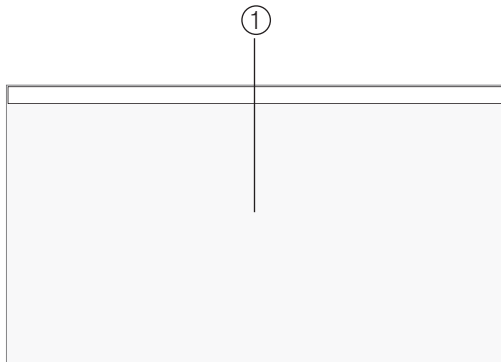


Die Bildschirm-Abdeckung (1) wird entfaltet

2

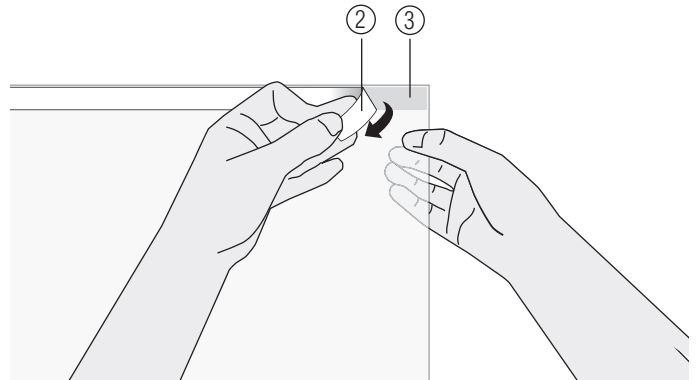

Danach wird das Schutzpapier (2) des Klebestreifens (3) entfernt.

3

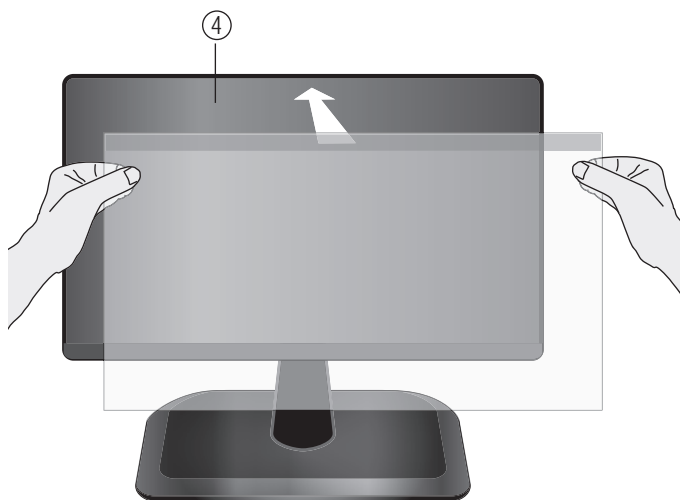

Nun wird die Abdeckung - in Kleberichtung - am oberen Rand des Monitors (4) positioniert

4



Durch Glattstreichen der Folie im Bereich des Klebestreifens wird die Abdeckung auf dem Monitor besser fixiert.



VARIANTEN

UNILINE® Bildschirmabdeckung	REF 37054	REF 37057	REF 37059
Größe	340 x 360 mm	650 x 360 mm	780 x 360 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.			

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



Nicht zur Wiederverwendung



www.heisig.de


Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.



Trocken lagern



Nicht erneut sterilisieren

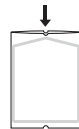

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel

CE 0197

Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

