





**FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug** **STERILE R**

**Zweckbestimmung:** Steriler Lichtkabel-Bezug für die Dauer einer Anwendung

**1**

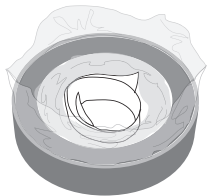


**2**

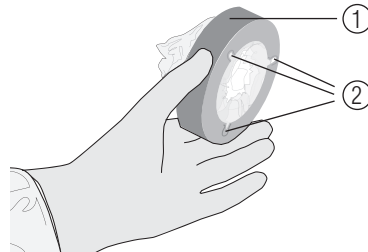


Die sterile Person nimmt den Ring (1) so, dass die Kabelklemmen (2) nach vorne zeigen.

**3**

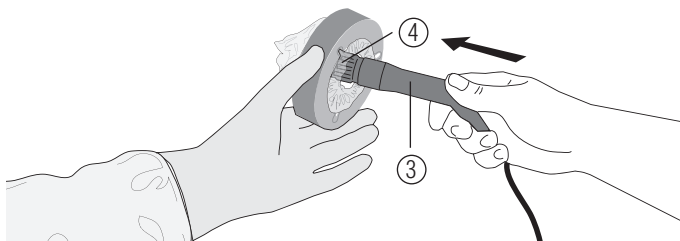


Die Kamera (3) wird durch die Ringmitte (4) geschoben.

**4**

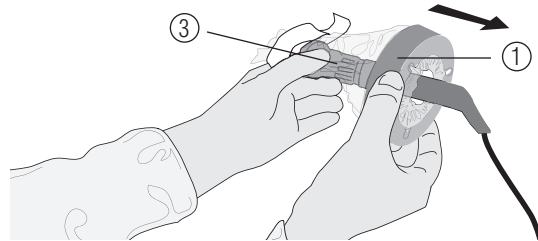


Die sterile Person greift die im Folienschlauch befindliche Kamera (3) und schiebt den Ring (1) weiter über das Kabel

**5**

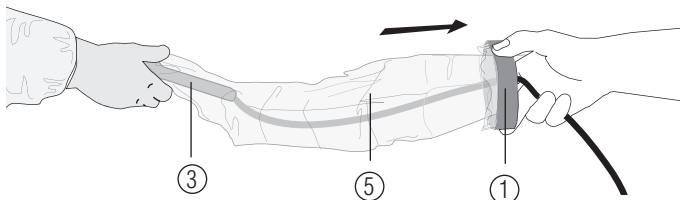


Durch Ziehen am Ring (1) wird der Folienschlauch (5) über die gesamte Länge entfaltet, während die sterile Person den Folienschlauch an der Kamera (3) festhält.

**6**

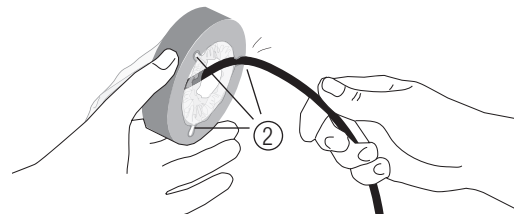


Zur besseren Fixierung wird das Kamerakabel in eine der Kabelklemmen (2) eingehängt.

**7**

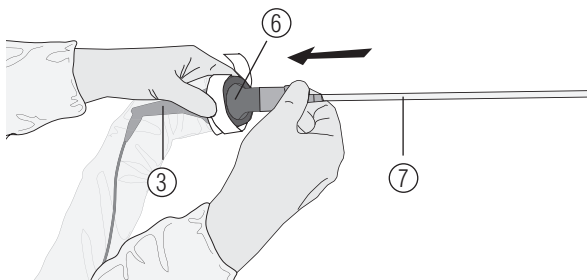

Die sterile Person führt an der Schlauchspitzen-Öffnung (6) die Staboptik (7) ein und klemmt diese auf die Kamera (3).

**8**

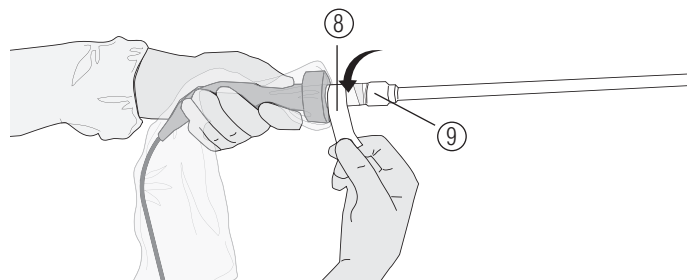

Mit dem an der Schlauchspitze befestigten Klebeband (8) wird die Folie am Hals (9) der Staboptik fixiert.



PACKUNGSINHALT		DETAILS
<b>REF 32150</b>	FLEXASTER® Lichtkabel-Bezug	Größe: 15 x 250 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

## WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



**ACHTUNG:**  
Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



**ACHTUNG:**  
Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



[www.heisig.de](http://www.heisig.de)

Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.




Nicht zur Wiederverwendung



Trocken lagern



**ACHTUNG:**  
**Nicht zur Wiederverwendung geeignet**, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.

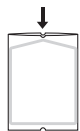

**ACHTUNG:**  
Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Nicht erneut sterilisieren



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

## WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:  
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

