



FLEXANORM® Formbezug C-Set

STERILE R

Zweckbestimmung: Sterile C-Bogen-Abdeckung für die Dauer einer Anwendung

1

Vor der Anwendung:
Zur besseren Haftung der Klebeflächen die C-Bogen-Seitenflächen mit Isopropylalkohol reinigen.

2

C-Bogen-Formbezug

Abdeckhaube Bildverstärker **B** Abdeckhaube Röntgenstrahler **R**

Klebefläche **K1**
Klebefläche **K2** Klebefläche **K2**
Klebeflächen **K3** Klebeflächen **K3**
Klebefläche **K4**

3

Mit beiden Händen das C-Bogen-Paket (1) mittig nehmen, das blaue Schutzpapier von der Klebefläche **K1** (2) lösen.

4

C-Bogenpaket mit Klebefläche **K1** unterhalb des Bildverstärkers (3) festkleben. Schutzpapier der Klebeflächen **K2** (4) abziehen und an den Seiten des C-Bogens festkleben.

5

Pfeiletikett **1** (5) öffnen und Folienteil nach unten klappen. Schutzpapier von den Klebeflächen **K3** (6) abziehen und an den Seiten des C-Bogens festkleben.

6

Ebenso mit Pfeiletikett **2** verfahren, Formteil ganz ausklappen und mit Klebefläche **D** vor dem Röntgenstrahler (7) und an den Seiten des C-Bogens festkleben.

7

Beigefügte Sterilhauben **B** und **R** über Bildverstärker (3) und Röntgenstrahler (7) stülpen, dadurch wird der C-Bogen-Bezug zusätzlich fixiert.



Bestandteile	FORMBEZUG für C-Bogen		ABDECKHAUBE für Bildverstärker (B)					ABDECKHAUBE für Röntgenstrahler (R)	
	165 cm	181 cm	für 6 Zoll (ca. Ø 15 cm) 40 (+17) x 60 cm	für 7 Zoll (ca. Ø 17 cm) 46 (+24) x 69 cm	für 9 Zoll (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 75 cm	für 12 Zoll (ca. Ø 31 cm) m. Wickelband zur Verbesserung der Passform 60 (+40) x 103 cm	für 9 Zoll m. Handgriff (ca. Ø 23 cm) 49 (+30) x 100 cm	45 (+17) x 65 cm	
REF: 34521	REF: 34500		REF: 30054					REF: 30061	
REF: 34531				REF: 30077					
REF: 34541					REF: 30079				
REF: 34551						REF: 30096			
REF: 34561							REF: 30086		
REF: 34731			REF: 34700		REF: 30077				
REF: 34741						REF: 30079			
REF: 34751							REF: 30096		
REF: 34761									REF: 30086
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.									

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



Nicht zur Wiederverwendung



www.heisig.de


Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.heisig.de heruntergeladen werden.



Trocken lagern



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung **geeignet**, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.

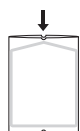

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Nicht erneut sterilisieren



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

