




FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel

STERILE R


Zweckbestimmung: Steriler Ultraschallbezug für die Dauer einer Anwendung auf gesunder Haut

1

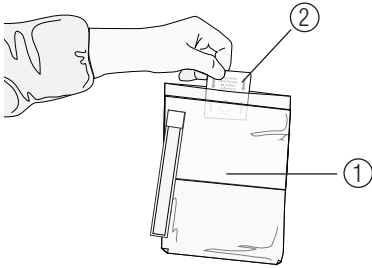


Die sterile Person nimmt den Bezug (1) am Etikett (2), ...

2

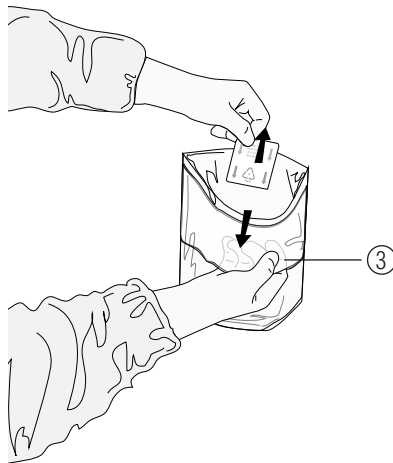


...greift mit der anderen Hand den Bezug innerhalb des Umschlags (3) und weitet die Öffnung.

3

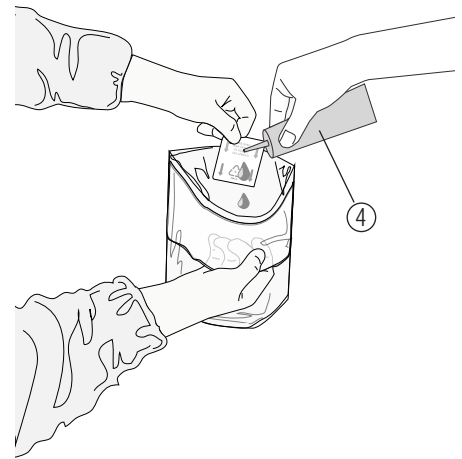


Das Gel (4) kann jetzt in den Bezug gegeben werden.

4

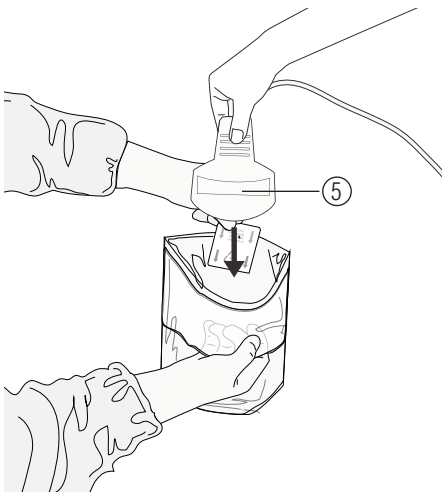


Der Ultraschallkopf (5) wird in den Bezug eingeführt.

5

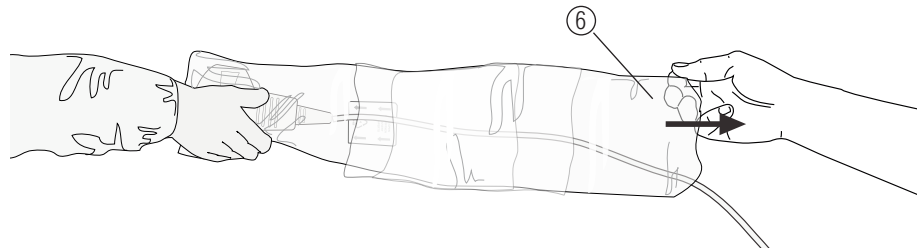

Durch Ziehen an der Folie (6) wird der Bezug über die gesamte Länge entfaltet, während die sterile Person den Ultraschallkopf im Folienschlauch festhält.

6

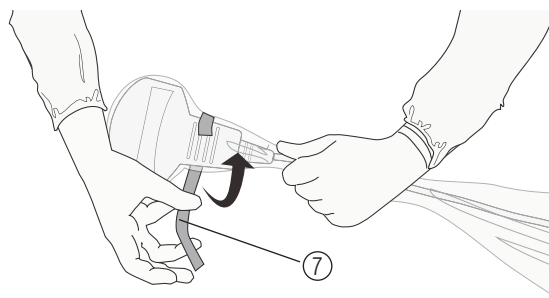

Nun kann mithilfe des Klebebandes (7) der Bezug am Griff des Ultraschallkopfes fixiert werden.



PACKUNGSIHALT		DETAILS
REF 31200	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel	Größe: 15 x 200 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG: Die Anwendung des Ultraschallbezuges darf nur **auf gesunder Haut** erfolgen!



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Nicht zur Wiederverwendung



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



www.heisig.de

Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.




Trocken lagern



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Nicht erneut sterilisieren

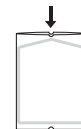

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**

CE 0197

Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

