



FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel

STERILE R

Zweckbestimmung: Steriler Ultraschallbezug für die Dauer einer Anwendung auf gesunder Haut

1	2	3
<p>Die sterile Person greift den Bezug (1) an der Öffnung und rafft den Folienschlauch nach oben.</p>	<p>Nun greift sie den Bezug innerhalb des Umschlags und weitet die Öffnung. Das Gel (2) kann jetzt in das Innere des Bezugs gegeben werden.</p>	<p>Der Ultraschallkopf (3) wird in den Bezug eingeführt.</p>
4	5	6
<p>Die sterile Person zieht den Ultraschallkopf nach unten und entfaltet den Bezug.</p>	<p>Nun kann mithilfe des Klebebandes (4) der Bezug fixiert werden.</p>	<p>Mit dem zweiten Klebeband (5) kann zusätzlich das Kabel fixiert werden.</p>



PACKUNGSIHALT		DETAILS
REF 31020	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel	Größe: 20 x 115 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG: Die Anwendung des Ultraschallbezuges darf nur **auf gesunder Haut** erfolgen!



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Nicht zur Wiederverwendung



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



www.heisig.de

Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.




Trocken lagern



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Nicht erneut sterilisieren

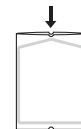

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**

CE 0197

Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

