




## STERINORM® Rund-Haube **STERILE R**


**Zweckbestimmung:** Sterile Haube zur Abdeckung von Geräten für die Dauer einer Anwendung

1

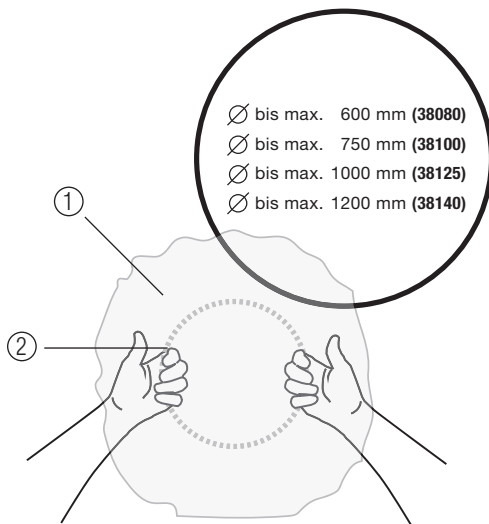


Die Haube (1) mit der Öffnung nach unten am Synthetikband (2) greifen

2

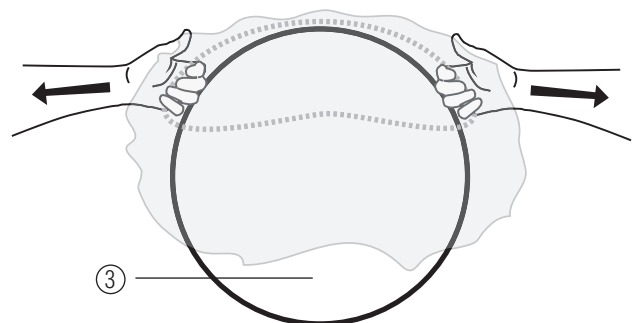


Über ein Ende des abzudeckenden Objektes (3) stülpen und auseinanderziehen.

3

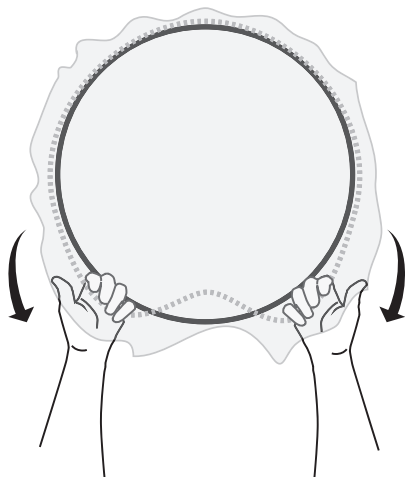

Unter ständigem Zug das Objekt komplett abdecken.

4

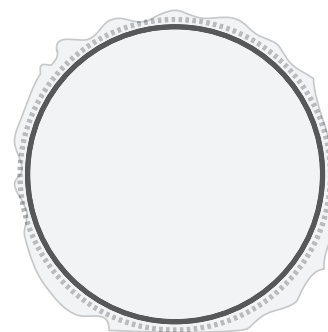

## VARIANTEN

STERINORM® Rund-Haube	REF 38080	REF 38100	REF 38125	REF 38140
Größe	Ø 850 mm	Ø 950 mm	Ø 1250 mm	Ø 1400 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.				

## WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



**ACHTUNG:** Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



**ACHTUNG:** Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



**ACHTUNG: Lüftungsöffnungen dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden!** Bei abgedeckten Geräten kann es zu Überhitzung kommen.



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Nicht zur Wiederverwendung



**ACHTUNG:** Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



**ACHTUNG:** **Nicht zur Wiederverwendung geeignet**, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



[www.heisig.de](http://www.heisig.de)


Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter [www.heisig.de](http://www.heisig.de) heruntergeladen werden.



Trocken lagern



Nicht erneut sterilisieren

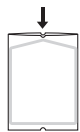

**ACHTUNG:** Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**

CE 0197

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

## WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:  
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

