




STERINORM® Viereck-Haube

STERILE R


Zweckbestimmung: Sterile Haube zur Abdeckung von Geräten für die Dauer einer Anwendung

1

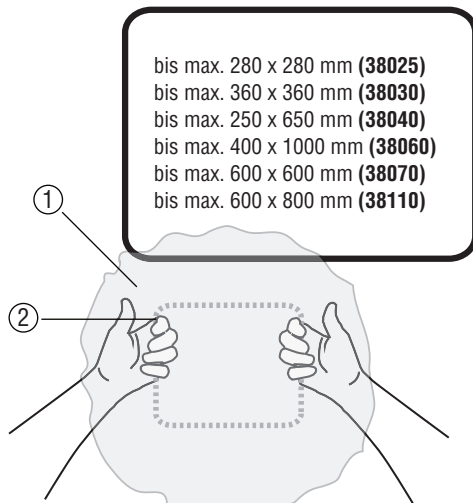


Die Haube (1) mit der Öffnung nach unten am Synthetikband (2) greifen

2

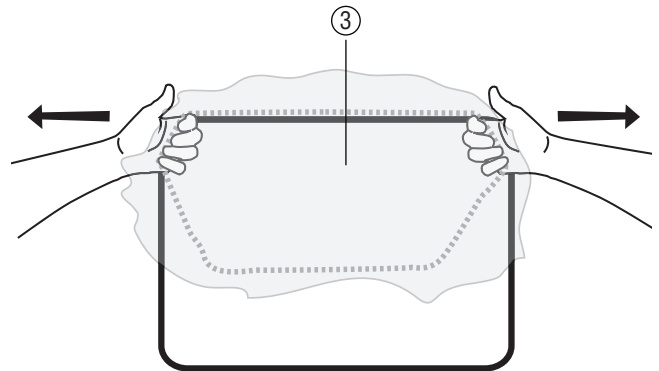

Auseinanderziehen und über ein Ende des abzudeckenden Objektes (3) stülpen.

3

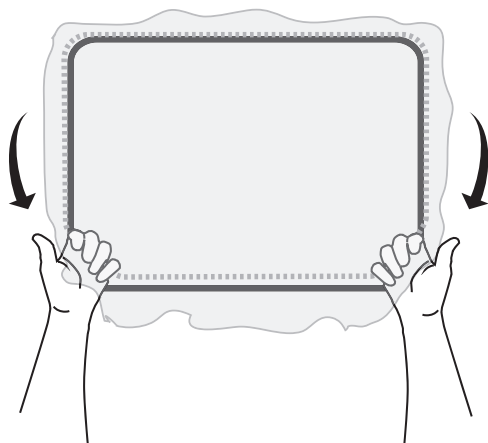







Unter ständigem Zug das Objekt komplett abdecken.

4



VARIANTEN						
STERINORM® Viereck-Haube	REF 38025	REF 38030	REF 38040	REF 38060	REF 38070	REF 38110
Größe	420 x 420 mm	550 x 550 mm	450 x 750 mm	600 x 1250 mm	800 x 800 mm	850 x 1050 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.						

WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN

-  Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.
-  **ACHTUNG:** Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**
-  Nicht zur Wiederverwendung.
-  Nicht erneut sterilisieren.
-  **ACHTUNG:** Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.
-  **ACHTUNG:** Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**
-  **ACHTUNG:** Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**
-  Trocken lagern.
-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
-  **ACHTUNG:** Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**
-  **ACHTUNG:** Lüftungsöffnungen dürfen auf keinen Fall **abgedeckt werden!** Bei abgedeckten Geräten kann es zu Überhitzung kommen.
-  **ACHTUNG:** Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!
-  **ACHTUNG:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

-  **STERILE R** Strahlensterilisiert
-  Haltbarkeitsdatum
-  Latexfrei
-  Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.
-  Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel
-  Personalnummer des fertigen Mitarbeiters
-  Chargen-Nummer: JMMM0123
-  Hersteller
-  Anzahl der Peelbeutel pro Karton
-  Herstellungsdatum
-  Artikelnummer
-  Pharmazentralnummer
-  Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.
-  Medizinprodukt
-  Einfach-Sterilbarrieresystem
-  Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung
-  Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

