




STERINORM® Viereck-Haube **STERILE R**


Zweckbestimmung: Sterile Haube zur Abdeckung von Geräten für die Dauer einer Anwendung

1

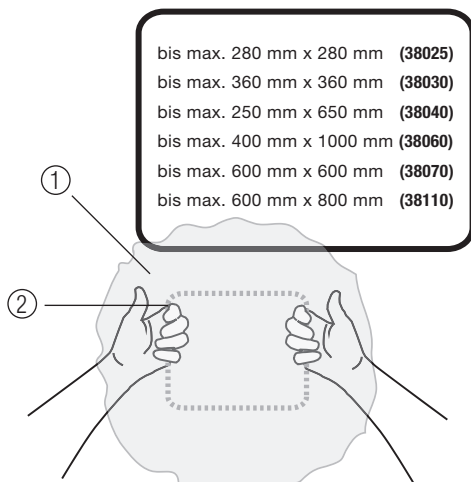


Die Haube (1) mit der Öffnung nach unten am Synthetikband (2) greifen

2

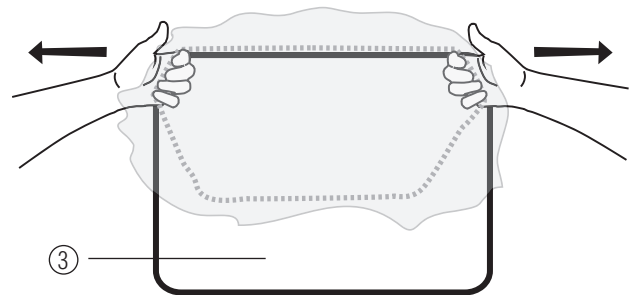

Auseinanderziehen und über ein Ende des abzudeckenden Objektes (3) stülpen.

3

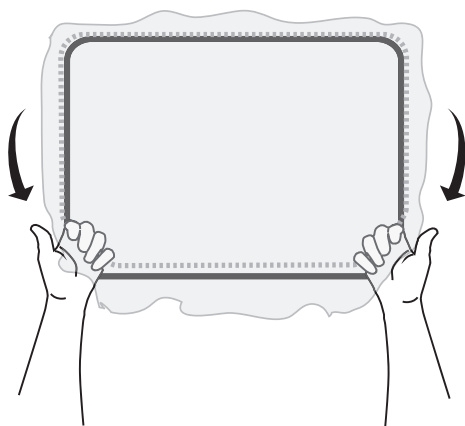

Unter ständigem Zug das Objekt komplett abdecken.

4



VARIANTEN

STERINORM® Viereck-Haube	REF 38025	REF 38030	REF 38040	REF 38060	REF 38070	REF 38110
Größe	420 x 420 mm	550 x 550 mm	450 x 750 mm	600 x 1250 mm	800 x 800 mm	850 x 1050 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.						

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG: Lüftungsöffnungen dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden! Bei abgedeckten Geräten kann es zu Überhitzung kommen.



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Nicht zur Wiederverwendung



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



ACHTUNG: **Nicht zur Wiederverwendung geeignet**, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



www.heisig.de


Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.heisig.de heruntergeladen werden.



Trocken lagern



Nicht erneut sterilisieren

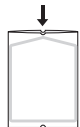

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**

CE 0197

Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.

Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

