




UNILINE® Fernbedienungs-Bezug

STERILE R


Zweckbestimmung: Steriler Fernbedienungs-Bezug für die Dauer einer Anwendung

1

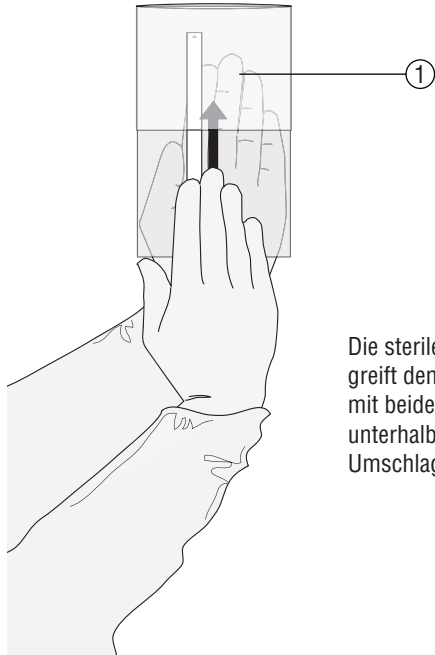


Die sterile Person greift den Bezug (1) mit beiden Händen unterhalb des Umschlags.

2

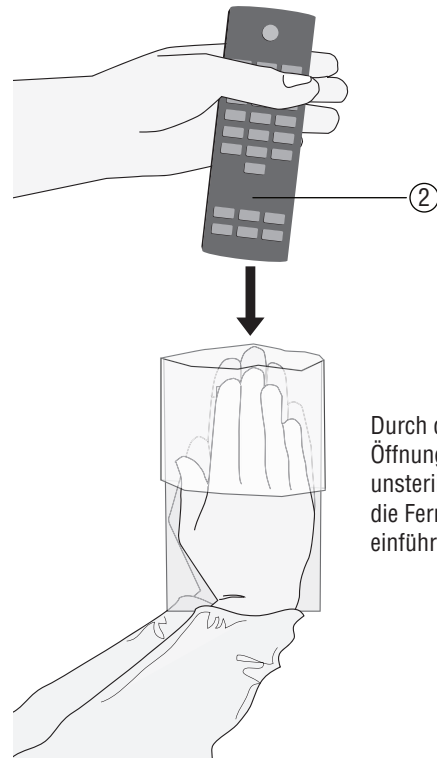


Durch die geweitete Öffnung kann die unsterile Person nun die Fernbedienung (2) einführen.

3

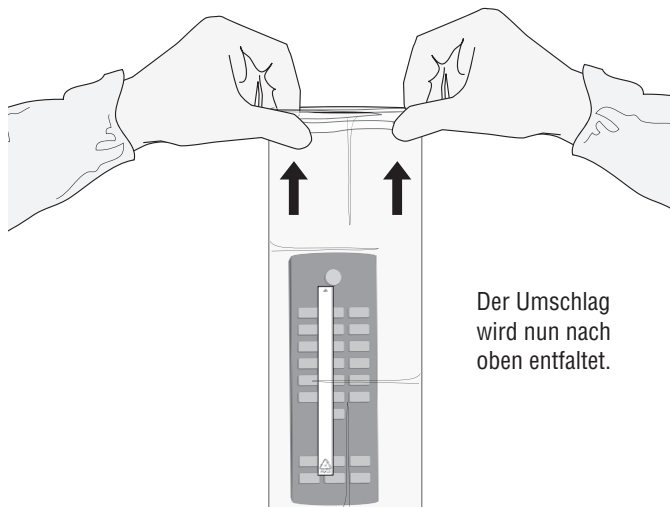

Der Umschlag wird nun nach oben entfaltet.

4

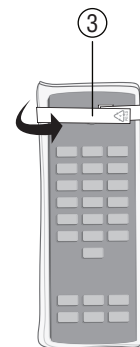

Eventuell überstehende Teile des Bezuges werden nach hinten und unten umgeschlagen und mit dem Klebeband (3) fixiert.



PACKUNGSINHALT		DETAILS
REF 30002	UNILINE® Fernbedienungs-Bezug	Größe: 160 x 350 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



Nicht zur Wiederverwendung.



Nicht erneut sterilisieren.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt nur für die beiliegenden Produkte.



ACHTUNG: Peelbeutel an der Dachnaht öffnen!



Trocken lagern.



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **visuelle Analyse** erschweren!



ACHTUNG: Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!



ACHTUNG: Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Strahlensterilisiert



Haltbarkeitsdatum



Latexfrei



Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters



Chargen-Nummer:
JJMM0123



Hersteller



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Herstelldatum



Artikelnummer

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer



Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.



Medizinprodukt



Einfach-Sterilbarrieresystem



Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

