




UNILINE® Fernbedienungs-Bezug **STERILE R**


Zweckbestimmung: Steriler Fernbedienungs-Bezug für die Dauer einer Anwendung

1

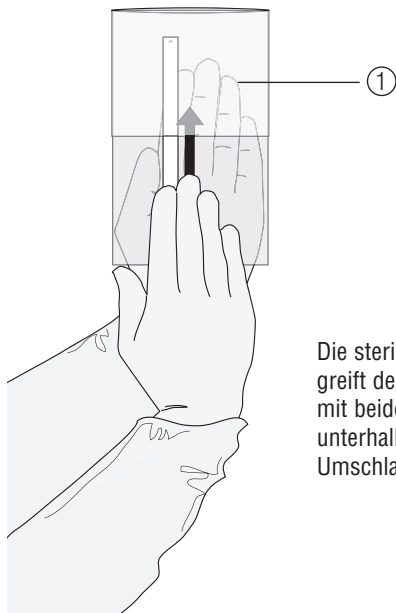


Die sterile Person greift den Bezug (1) mit beiden Händen unterhalb des Umschlags.

2

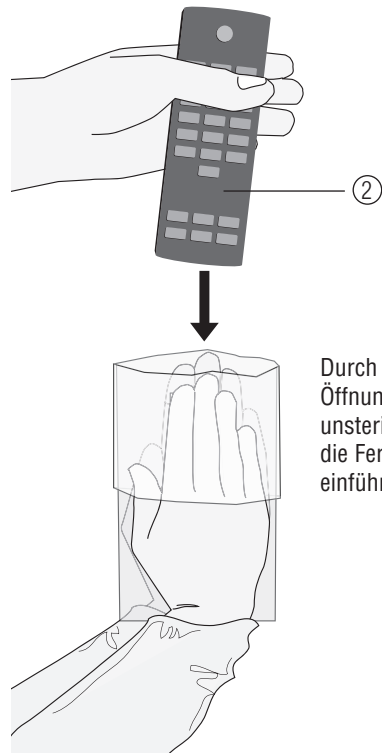


Durch die geweitete Öffnung kann die unsterile Person nun die Fernbedienung (2) einführen.

3

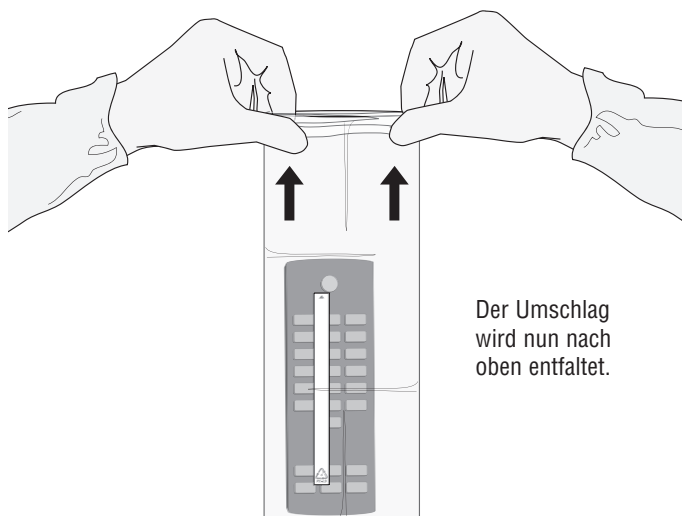

Der Umschlag wird nun nach oben entfaltet.

4

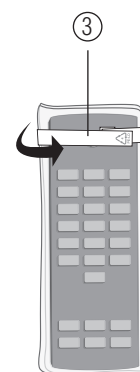

Eventuell überstehende Teile des Bezuges werden nach hinten und unten umgeschlagen und mit dem Klebeband (3) fixiert.



PACKUNGSINHALT		DETAILS
REF 30002	UNILINE® Fernbedienungs-Bezug	Größe: 16 x 35 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG:
Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **visuelle Analyse erschweren!**



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG:
Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



Nicht zur Wiederverwendung



www.heisig.de

Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.heisig.de heruntergeladen werden.



Trocken lagern




ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Nicht erneut sterilisieren

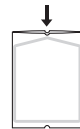

ACHTUNG:
Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**



Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

