





FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel

STERILE R


Zweckbestimmung: Steriler Ultraschallbezug für die Dauer einer Anwendung auf gesunder Haut

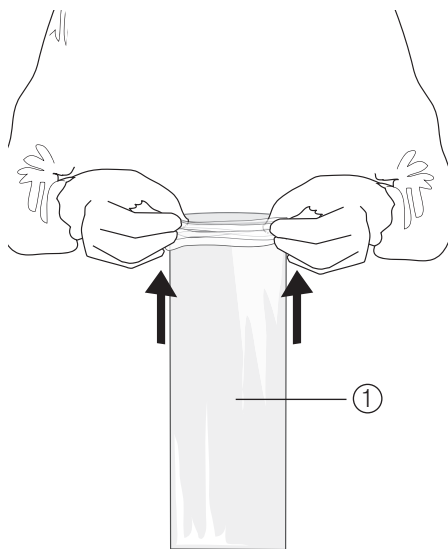


Die sterile Person greift den Bezug (1) an der Öffnung und rafft den Folienschlauch nach oben.

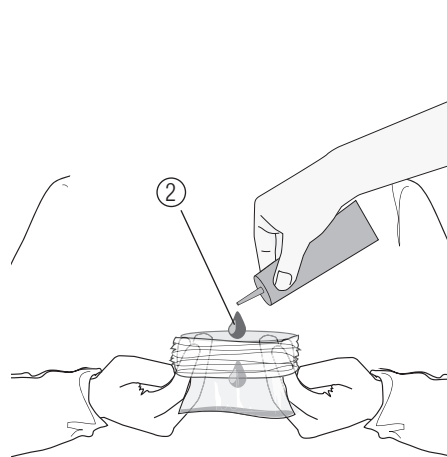


Nun greift sie den Bezug innerhalb des Umschlags und weitet die Öffnung. Das Gel (2) kann jetzt in das Innere des Bezugs gegeben werden.

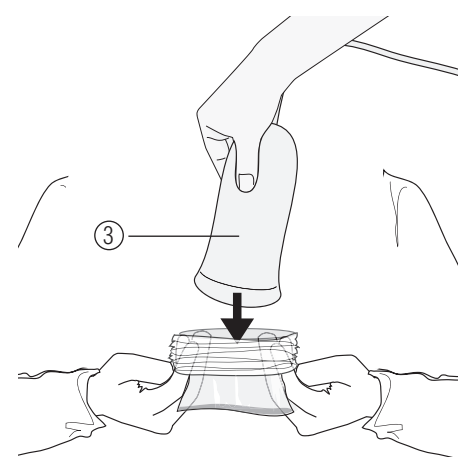

Der Ultraschallkopf (3) wird in den Bezug eingeführt.

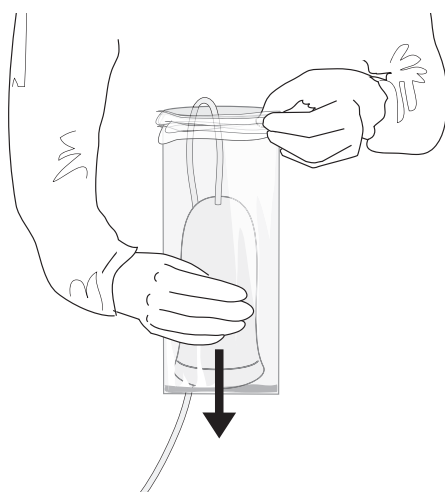

Die sterile Person zieht den Ultraschallkopf nach unten und entfaltet den Bezug.

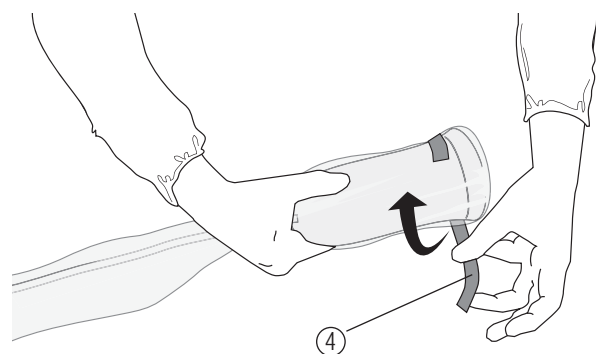

Nun kann mithilfe des Klebebandes (4) der Bezug fixiert werden.



VARIANTEN

FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel	REF 31011	REF 31015
Größe	11 x 50 cm	15 x 50 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



ACHTUNG: Die Anwendung des Ultraschallbezuges darf nur **auf gesunder Haut** erfolgen!



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Nicht zur Wiederverwendung



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



www.heisig.de

Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.




Trocken lagern



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



Nicht erneut sterilisieren

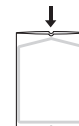

ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**

CE 0197

Produkt ist konform zu gültiger Richtlinie. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Haltbarkeitsdatum



Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters



Herstelldatum



Latexfrei



Chargen-Nummer:
Jahr / Monat / fortlaufende Nummer



Artikelnummer



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer

