




# FLEXANORM® Formbezug C-Set STERILE R

**Zweckbestimmung:** Sterile C-Bogen-Abdeckung für die Dauer einer Anwendung.



1

### Vor der Anwendung:


Zur besseren Haftung der Klebeflächen die C-Bogen-Seitenflächen mit Isopropylalkohol reinigen.

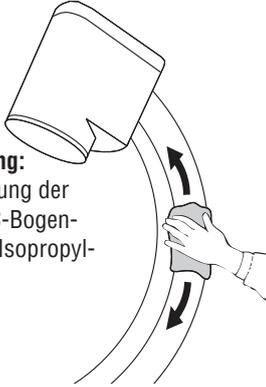

2

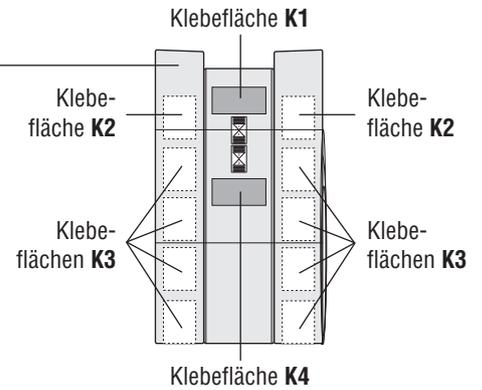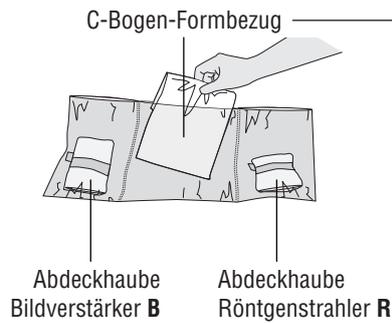


3

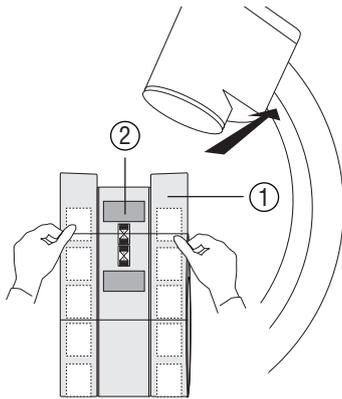


Mit beiden Händen das C-Bogen-Paket (1) mittig nehmen, das blaue Schutzpapier von der Klebefläche K1 (2) lösen.

4

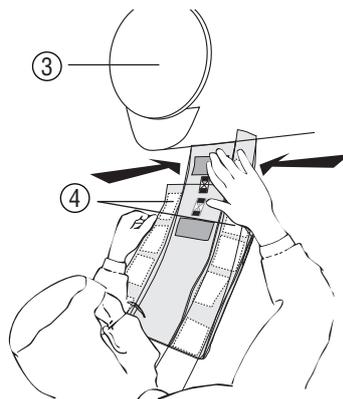

C-Bogenpaket mit Klebefläche K1 unterhalb des Bildverstärkers (3) festkleben. Schutzpapier der Klebeflächen K2 (4) abziehen und an den Seiten des C-Bogens festkleben.


5

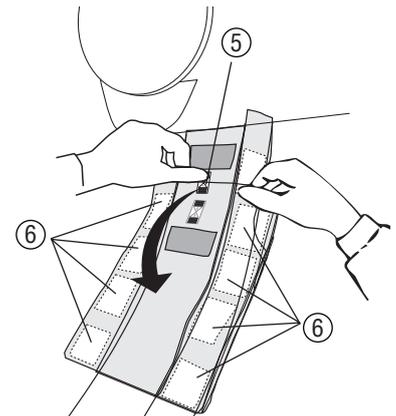

Pfeiletikett 1 (5) öffnen und Folienteil nach unten klappen. Schutzpapier von den Klebeflächen K3 (6) abziehen und an den Seiten des C-Bogens festkleben.


6

Ebenso mit Pfeiletikett 2 verfahren, Formteil ganz ausklappen und mit Klebefläche K4 vor dem Röntgenstrahler (7) und an den Seiten des C-Bogens festkleben.

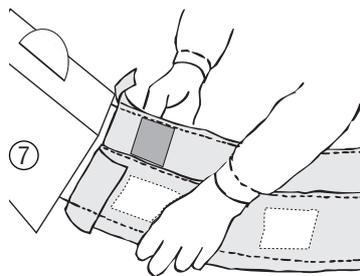

7

Beigefügte Sterilhauben B und R über Bildverstärker (3) und Röntgenstrahler (7) stülpen, dadurch wird der C-Bogen-Bezug zusätzlich fixiert.

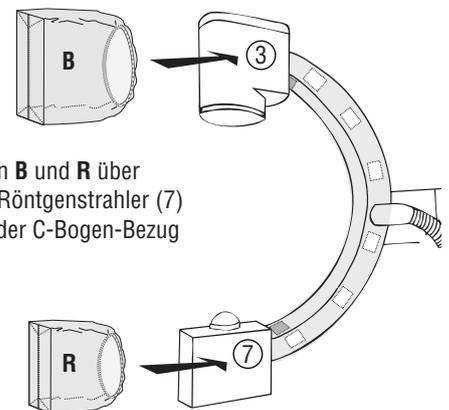

		BESTANDTEILE							
		FORM-BEZUG für C-Bogen		ABDECKHAUBE für Bildverstärker (B)				ABDECKHAUBE f. Röntgenstrahler (R)	
		REF 34500	REF 34700	REF 30054	REF 30077	REF 30079	REF 30096	REF 30086	REF 30061
		Länge: 165 cm	Länge: 181 cm	Größe: 40(+17)x60 cm	Größe: 46(+24)x69 cm	Größe: 49(+30)x75 cm	Größe: 60(+40)x103 cm	Größe: 49(+30)x100 cm	Größe: 45(+17)x65 cm
SETS 3-teilig	REF 34521	●		●					●
	REF 34531	●			●				●
	REF 34541	●				●			●
	REF 34551	●					●		●
	REF 34561	●						●	●
	REF 34731		●		●				●
	REF 34741		●			●			●
	REF 34751		●				●		●
	REF 34761		●					●	●

Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.

### WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.



**ACHTUNG:** Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



Nicht zur Wiederverwendung.



Nicht erneut sterilisieren.



**ACHTUNG:** Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



**ACHTUNG:** Die Gebrauchsanweisung gilt nur für die beiliegenden Produkte.



**ACHTUNG:** Peelbeutel an der Dachnaht öffnen!



Trocken lagern.



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



**ACHTUNG:** Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!



**ACHTUNG:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

### WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Strahlensterilisiert



Haltbarkeitsdatum



Latexfrei



[www.heisig.de](http://www.heisig.de)

Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter [www.heisig.de](http://www.heisig.de) heruntergeladen werden.



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters



Chargen-Nummer:  
JMMM0123



Hersteller



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Herstelldatum



Artikelnummer



PZN: 0000000

Pharmazentralnummer



Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.



Medizinprodukt



Einfach-Sterilbarrieresystem



Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

