




UNILINE® Bildschirm-Abdeckung **STERILE R**


Zweckbestimmung: Sterile, hochtransparente Folie zur Abdeckung von Monitoren für die Dauer einer Anwendung

1

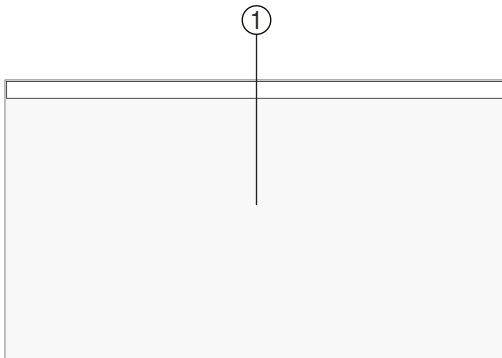


Die Bildschirm-Abdeckung (1) wird entfaltet

2

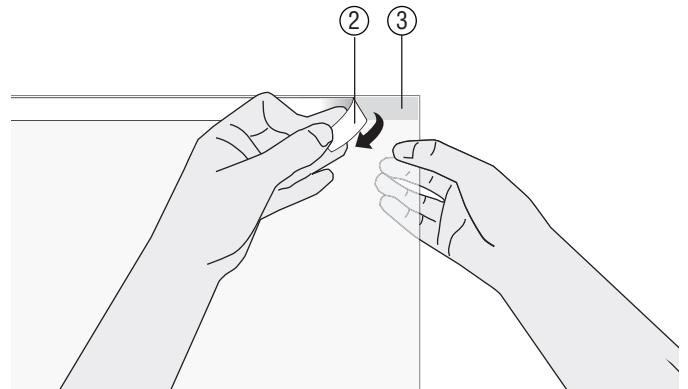

Danach wird das Schutzpapier (2) des Klebestreifens (3) entfernt.

3

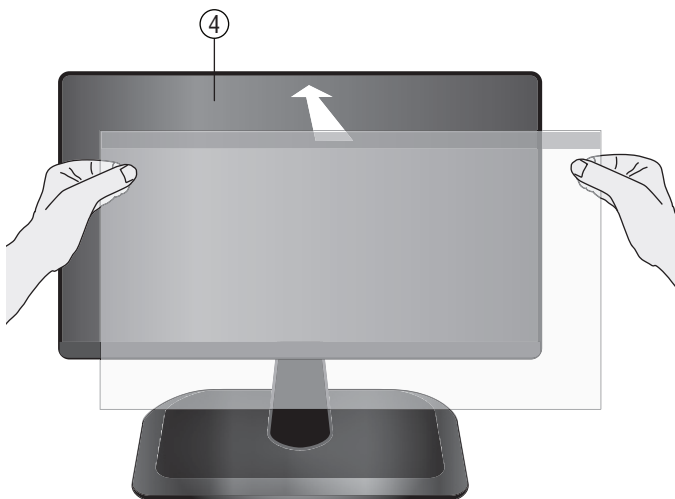

Nun wird die Abdeckung - in Kleberichtung - am oberen Rand des Monitors (4) positioniert

4



Durch Glattstreichen der Folie im Bereich des Klebestreifens wird die Abdeckung auf dem Monitor besser fixiert.



VARIANTEN

UNILINE® Bildschirm-Abdeckung	REF 37054	REF 37057	REF 37059
Größe	340 x 360 mm	650 x 360 mm	780 x 360 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.			

WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



Nicht zur Wiederverwendung.



Nicht erneut sterilisieren.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**



Trocken lagern.



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



ACHTUNG: Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**



ACHTUNG: Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!



ACHTUNG: Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Strahlensterilisiert



Haltbarkeitsdatum



Latexfrei



Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter **www.heisig.de** heruntergeladen werden.



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



Personalnummer des fertigen Mitarbeiters



Chargen-Nummer:
JMMM0123



Hersteller



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Herstelldatum



Artikelnummer

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer



Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.



Medizinprodukt



Einfach-Sterilbarrieresystem



Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

