




FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel

STERILE R


Zweckbestimmung: Steriler Ultraschallbezug für die Dauer einer Anwendung auf gesunder Haut

1

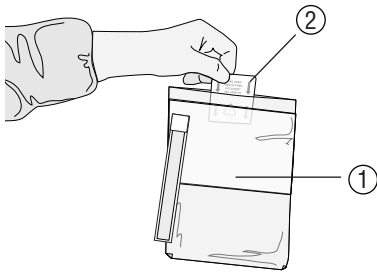


Die sterile Person nimmt den Bezug (1) am Etikett (2), ...

2

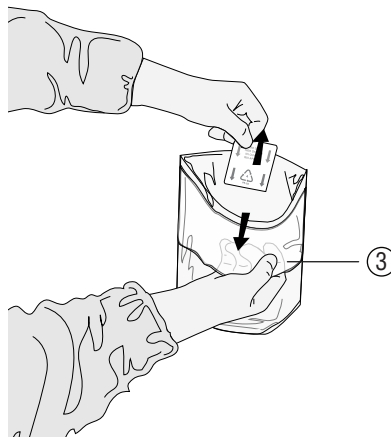


...greift mit der anderen Hand den Bezug innerhalb des Umschlags (3) und weitet die Öffnung..

3

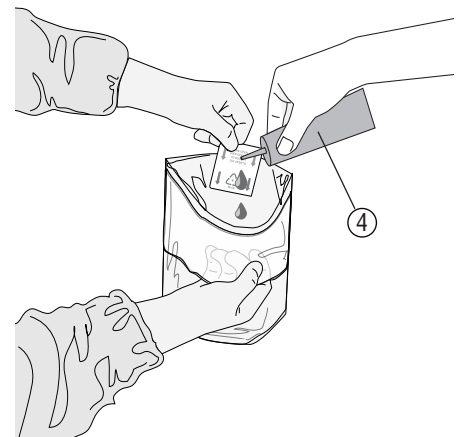


Das Gel (4) kann jetzt in den Bezug gegeben werden.

4

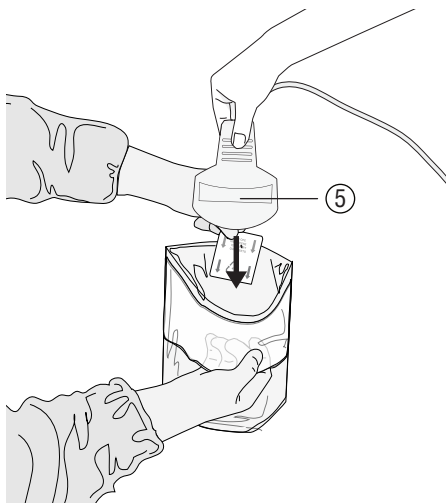


Der Ultraschallkopf (5) wird in den Bezug eingeführt.

5

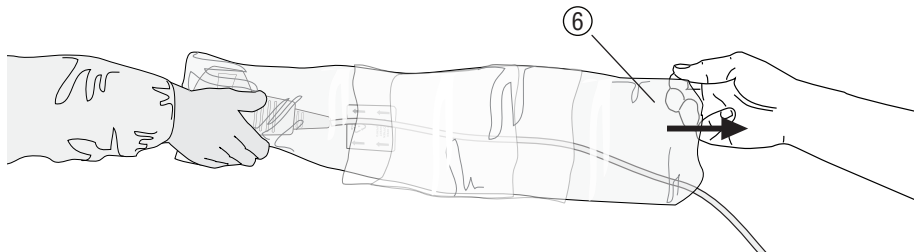

Durch Ziehen an der Folie (6) wird der Bezug über die gesamte Länge entfaltet, während die sterile Person den Ultraschallkopf im Folienschlauch festhält.

6

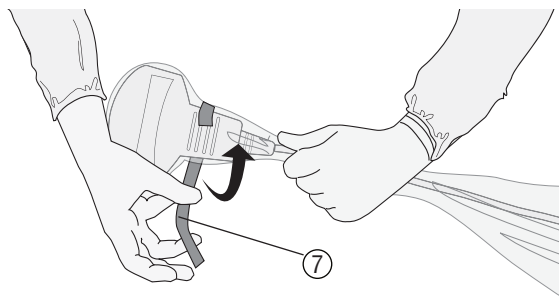

Nun kann mithilfe des Klebebandes (7) der Bezug am Griff des Ultraschallkopfes fixiert werden.



PACKUNGSINHALT		DETAILS
REF 31200	FLEXASOFT® Ultraschall-Bezug für Gel	Größe: 15 x 200 cm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN

-  Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.
-  **ACHTUNG:** Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**
-  Nicht zur Wiederverwendung.
-  Nicht erneut sterilisieren.
-  **ACHTUNG:** Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.
-  **ACHTUNG:** Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**
-  **ACHTUNG:** Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**
-  Trocken lagern.
-  Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.
-  **ACHTUNG:** Die Verwendung einer Geräteabdeckung kann die **Bildqualität beeinträchtigen!**
-  **ACHTUNG:** Die Anwendung des Ultraschall-Bezuges darf nur **auf gesunder Haut** erfolgen!
-  **ACHTUNG:** Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!
-  **ACHTUNG:** Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE

-  Strahlensterilisiert
-  Haltbarkeitsdatum
-  Latexfrei
-  Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.heisig.de heruntergeladen werden.
-  Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel
-  Personalnummer des fertigen Mitarbeiters
-  Chargen-Nummer: JMMM0123
-  Hersteller
-  Anzahl der Peelbeutel pro Karton
-  Herstellungsdatum
-  Artikelnummer
-  Pharmazentralnummer
-  Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.
-  Medizinprodukt
-  Einfach-Sterilbarrieresystem
-  Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung
-  Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

