




FLEXANORM® Fernbedienungs-Bezug

STERILE R


Zweckbestimmung: Steriler Fernbedienungs-Bezug für die Dauer einer Anwendung

1

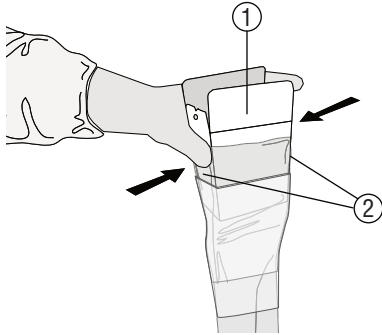


Zum Öffnen die flache Pappe (1) an den Kanten (2) zusammenpressen.

2

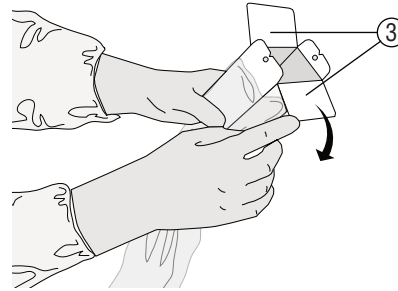


Danach die großen Laschen (3) am Falz nach außen drücken.

3

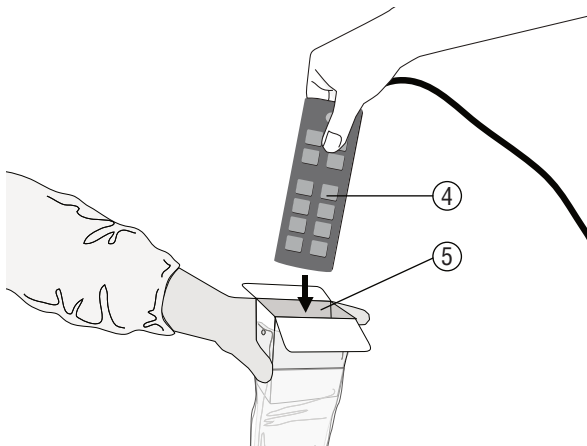


Die Fernbedienung (4) in die Öffnung (5) einführen und bis zur geschlossenen Schlauchseite rutschen lassen.

4

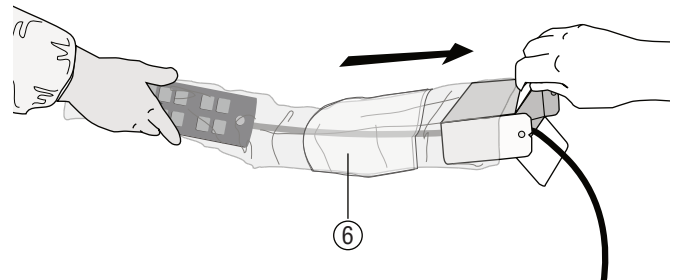


Durch Ziehen an der Pappen-Lasche wird der Folienschlauch (6) über die gesamte Länge entfaltet, während die sterile Person die Fernbedienung im Folienschlauch festhält.

5

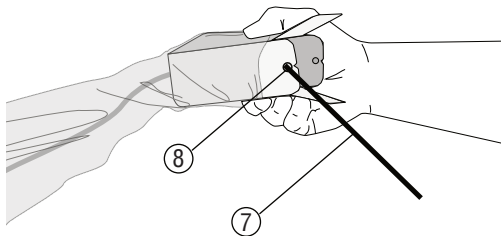

Zur besseren Fixierung wird das Fernbedienungskabel (7) in die Öse der Pappe (8) eingehängt.

6

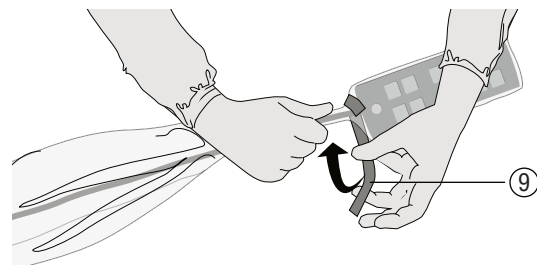

Nun kann mithilfe des Klebebandes (9) der Bezug an der Fernbedienung fixiert werden.



PACKUNGSIHALT		DETAILS
REF 31400	FLEXANORM® Fernbedienungs-Bezug	Größe: 130 x 2430 mm
Eine detaillierte Produktspezifikation ist auf Anfrage erhältlich.		

WARNHINWEISE und WICHTIGE INFORMATIONEN



Bei Sterilitätsverlust oder beschädigter Verpackung nicht verwenden.



ACHTUNG: Beschädigte Produkte **nicht verwenden!**



Nicht zur Wiederverwendung.



Nicht erneut sterilisieren.



ACHTUNG: Nicht zur Wiederverwendung geeignet, da die erforderlichen Leistungen versagen können und es zu einer Infektion des Patienten kommen kann.



ACHTUNG: Die Gebrauchsanweisung gilt **nur für die beiliegenden Produkte.**



ACHTUNG: Peelbeutel **an der Dachnaht öffnen!**



Trocken lagern.



Vor Sonnenlicht geschützt aufbewahren.



ACHTUNG: Nur von **medizinischem Fachpersonal** anzuwenden!



ACHTUNG: Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen **schwerwiegenden Vorfälle** sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.

WEITERE VERWENDETE SYMBOLE



Strahlensterilisiert



Haltbarkeitsdatum



Latexfrei



Gebrauchsanweisung beachten. Die aktuelle Gebrauchsanweisung kann unter www.heisig.de heruntergeladen werden.



Anzahl der Verbrauchseinheiten pro Peelbeutel



Personalnummer des fertigenden Mitarbeiters



Chargen-Nummer:
JMMM0123



Hersteller



Anzahl der Peelbeutel pro Karton



Herstelldatum



Artikelnummer

PZN: 0000000

Pharmazentralnummer



Das Produkt ist konform zu gültigen gesetzlichen Anforderungen für Medizinprodukte. Hersteller wird durch benannte Stelle mit Nummer 0197 überwacht.



Medizinprodukt



Einfach-Sterilbarrieresystem



Einfach-Sterilbarrieresystem mit äußerer Schutzverpackung



Umweltschonend bei sachgerechter Entsorgung. Bei der Verbrennung entstehen keine toxischen Abgase. Deponie ohne Beeinträchtigung des Grundwassers.

