


STERINORM® Rivestimento fermaglio C-Set




Destinazione d'uso: Copertura sterile per arco a C per la durata di un impiego

La piegatura della pellicola tubolare (1) facilita il rivestimento del fermaglio.

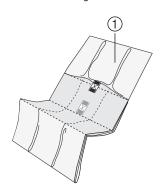

La persona sterile (2) apre la pellicola tubolare, introducendo le mani nel risvolto (3) in corrispondenza dell'etichetta con la freccia 1 (4).

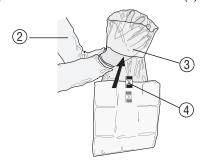

viene introdotto dall'ausiliario nella pellicola tubolare aperta.

II fermaglio non sterile (5)

La persona sterile toglie una mano dalla copertura e stacca l'etichetta con la freccia 1.




La pellicola tubolare viene tirata ancora sul fermaglio e si



Agganciare ora il

fermaglio nell'arco a C. Se il fissaggio della staffa è corretto, la pellicola tubolare non può

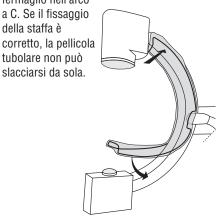

stacca l'etichetta

con la freccia 2 (6).

Una volta rivestito

completamente il

fermaglio con la

l'estremità della

rovesciata.

pellicola tubolare


sporgente (7) viene

pellicola tubolare,


Uso delle cappe in dotazione con il set:




La persona sterile forma un risvolto all'apertura del sacchetto...

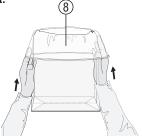

... e afferra la copertura con entrambe le mani all'interno del risvolto (8).

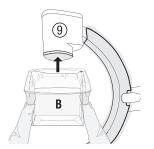

Ora è possibile imboccare la cappa **B** sull'amplificatore di brillanza (9),

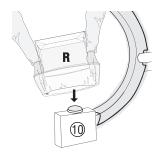

e la cappa R sul tubo radiogeno (10).

Data: 2023-02-13 Versione: P0142 IT Rev00







		COMPONENTI							
		COPERTURA TUBOLARE per arco a C	CAPPA per amplificatore di brillanza (B)				CAPPA per tubo radiogeno (R)		
		REF 34100	REF 30077	REF 30079	REF 30096	REF 30086	REF 30094	REF 30061	REF 30054
			Dimensioni: 46(+24)x69 cm	Dimensioni: 49(+30)x75 cm	Dimensioni: 60(+40)x103 cm	Dimensioni: 49(+30)x100 cm	Dimensioni: 60(+40)x75 cm	Dimensioni: 45(+17)x65 cm	Dimensioni: 40(+17)x60 cm
SET 3 pezzi 2 pezzi	REF 34101	•						•	
	REF 34102	•							•
	REF 34131	•	•					•	
	REF 34132	•	•						•
	REF 34141	•		•				•	
	REF 34151	•			•			•	
	REF 34161	•				•		•	
	REF 34171	•					•	•	
	REF 34172	•					•		•

AVVERTENZE e INFORMAZIONI IMPORTANTI



Non utilizzare in caso di perdita della sterilità o di confezione danneggiata



ATTENZIONE: Non utilizzare i prodotti danneggiati



Non riutilizzare



Non risterilizzare



ATTENZIONE: Non adatto al riutilizzo, perché le prestazioni necessarie potrebbero essere compromesse e potrebbe comparire un'infezione del paziente.



ATTENZIONE: Le istruzioni per l'uso valgono solo per i prodotti in dotazione.



ATTENZIONE: Aprire il sacchetto pelabile dalla cucitura sul lato superiore!



Conservare secco



Conservare al riparo dalla luce solare



ATTENZIONE: Da utilizzare solo da personale medico!



ATTENZIONE: Tutti gli incidenti gravi relativi al prodotto devono essere segnalati al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

ALTRI SIMBOLI UTILIZZATI

STERILE R

Sterilizzato con radiazioni ionizzanti



Data di scadenza



Senza lattice



Consultare le istruzioni per l'uso. È possibile scaricare le istruzioni per l'uso dal sito www.heisig.de www.heisig.de



Numero delle unità di consumo per sacchetto pelabile

웃 ooo

Numero personale del collaboratore addetto

LOT

Numero di lotto:



AAMM0123



Produttore



Numero dei sacchetti pelabili per scatola



Data di fabbricazione

REF 00000 **REF 00000**

Codice articolo

PZN: 0000000

Codice centrale farmaceutico



Il prodotto è conforme ai requisiti legali validi per i dispositivi medici. Il produttore viene monitorato con il numero 0197 dall'organismo notificato.



Dispositivo medico



Sistema a singola barriera sterile



Sistema a singola barriera sterile con imballaggio protettivo esterno



Ecologico se lo smaltimento è adequato. La combustione non dà origine a gas tossici. Deposito in discarica senza compromissione delle acque sotterranee.



